# 30310V

## Semimaschera filtrante FFP3 NR D

### Semimaschera filtrante piega verticale monouso con valvola

Le semimaschere filtranti della linea Clean Air sono certificate sulla base del Regolamento (UE) 2016/425 e rispondono ai requisiti definiti nella norma EN149:2001+A1:2009 sulla base della quale sono marcate. Certificato UE di tipo n° PPE370AT2194 emesso da ITALCERT S.r.l. Organismo Notificato n° 0426



#### Caratteristiche

- · Questi dispositivi possono essere utilizzati per proteggere gli utilizzatori da particolati solidi, liquidi non volatili e nebbie
- $\cdot$  Di facile adattamento al profilo del volto in ragione del ponte nasale deformabile
- · L'elastico passante nelle chele laterali consente un agevole adattamento della semimaschera da parte dell'utilizzatore
- · La confezione prevede nº 20 pezzi imbustati singolarmente contenuti in una scatola
- · La piega verticale della semi-maschera rende il prodotto tascabile e di facile conservazione.
- · Le semimaschere filtranti hanno superato il test di intasamento con polvere di dolomite (marcatura "D")

#### Materiali

Componente filtrante	Polipropilene (PP)
Valvola di esalazione	Polipropilene (PP)
Filtro ai carboni attivi	
Spugna d'appoggio ponte	
Elastici	Gomma elastica con chele in Polipropilene
Stringinaso	Polipropilene (anima interna in ferro)
Specifiche materiale	
Peso	13 g
Confezione	20 Pezzi conf. singolarmente in 1 inner-box / 12 inner-box in un carton-box

#### Prestazioni

Classificazione	Penetrazione del materiale del filtro da aerosol (i seguenti parametri non devono essere superati)	Limiti massimi ammissibili di resistenza nell'atto respiratorio applicabili alle semimaschere con e senza valvola (mbar)		
	Test aerosol a base Cloruro di sodio / Olio di paraffina flusso pari a 95 l/min % Max	Flusso in inalazione		Flusso in esalazione
		30 l/min	95 I/min	160 l/min
FFP3	Cloruro di sodio: 0,066% (contro il 1% da Normativa) Olio di paraffina: 0,146% (contro il 1% da Normativa)	0,5 mbar (contro i 1,0 mbar da Normativa)	1,4 mbar ( contro i 3,0 mbar da Normativa)	2,1 mbar (contro i 3,0 mbar da Normativa)

## Marcature / Norme

Standard Europeo EN149:2001 + A1:2009	Marcatura DPI	FFP3 NR D CE 0426

## Istruzioni per l'uso

Dispositivo monouso di protezione individuale. Prima di impiegarlo siete invitati a leggere attentamente la nota informativa ad esso associata. Prima dell'impiego del DPI nelle aree di rischio potenziale, verificare l'idoneità del dispositivo se del caso con il supporto di un esperto in sicurezza occupazionale. Si invita ad indossare questo dispositivo prima dell'inizio dell'attività per cui si è individuata la necessità d'impiego e prima dell'ingresso nelle aree dove vi è il rischio di esposizione a fonti di pericolo per cui le caratteristiche di questo dispositivo offrono protezione.

Rev.00 03/2023